


# FICHE TECHNIQUE DISPOSITIF BARRIERE

**SPECIAL  
CRISE SANITAIRE**

**SUR-BLOUSE**

**SPECIAL  
CRISE SANITAIRE**

- 🔥 Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manches
- 🔥 Avec une ouverture pour le passage de la tête (encolure) et deux ouvertures pour le passage des bras (emmanchure)
- 🔥 En PEBD 35 $\mu$ , pour plus de solidité, plus de protection aux divers particules, plus d'étanchéité

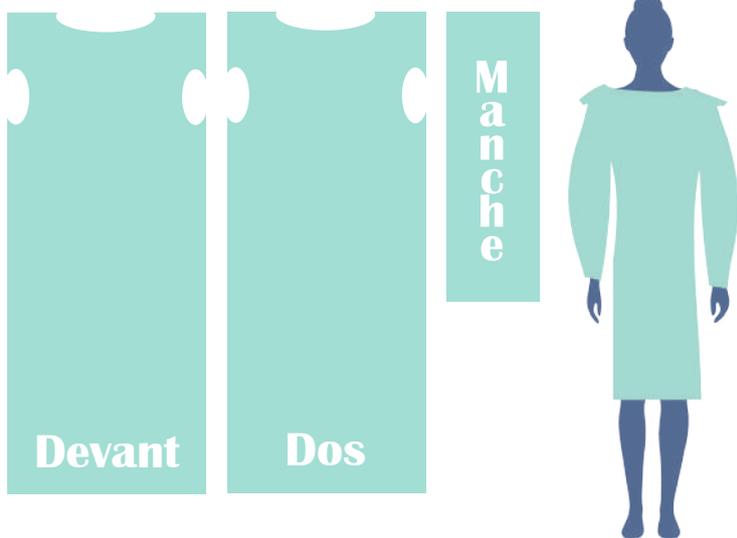

## Caractéristiques

Type	Sur-blouse	Manche
Dimensions	700x1200 mm	230x700 mm
Epaisseur	35 $\mu$	35 $\mu$
Couleur	Blanc	Blanc
Type de lien	sans	—
Type de soudure	Traditionnelle	Traditionnelle


## PROTOCOLE D'UTILISATION SUR BLOUSE

### Mettre:

- 1) Enfilez une première manche
- 2) Enfilez la deuxième manche
- 3) Prenez la blouse et passer la tête dans l'encolure
- 4 et 5) Passez un bras dans la première emmanchure puis l'autre bras dans la deuxième

### Retirer

- 7 et 8) Saisissez la blouse par l'arrière
- 9) Passez la tête dans l'encolure en ramenant tout sur le devant
- 9) Ramenez à l'avant tout en tenant dans vos mains la partie intérieure de la blouse.
- 10) Ramenez le reste de la blouse sur le devant
- 11) Formez une boule afin de ne pas toucher la partie extérieure de la blouse

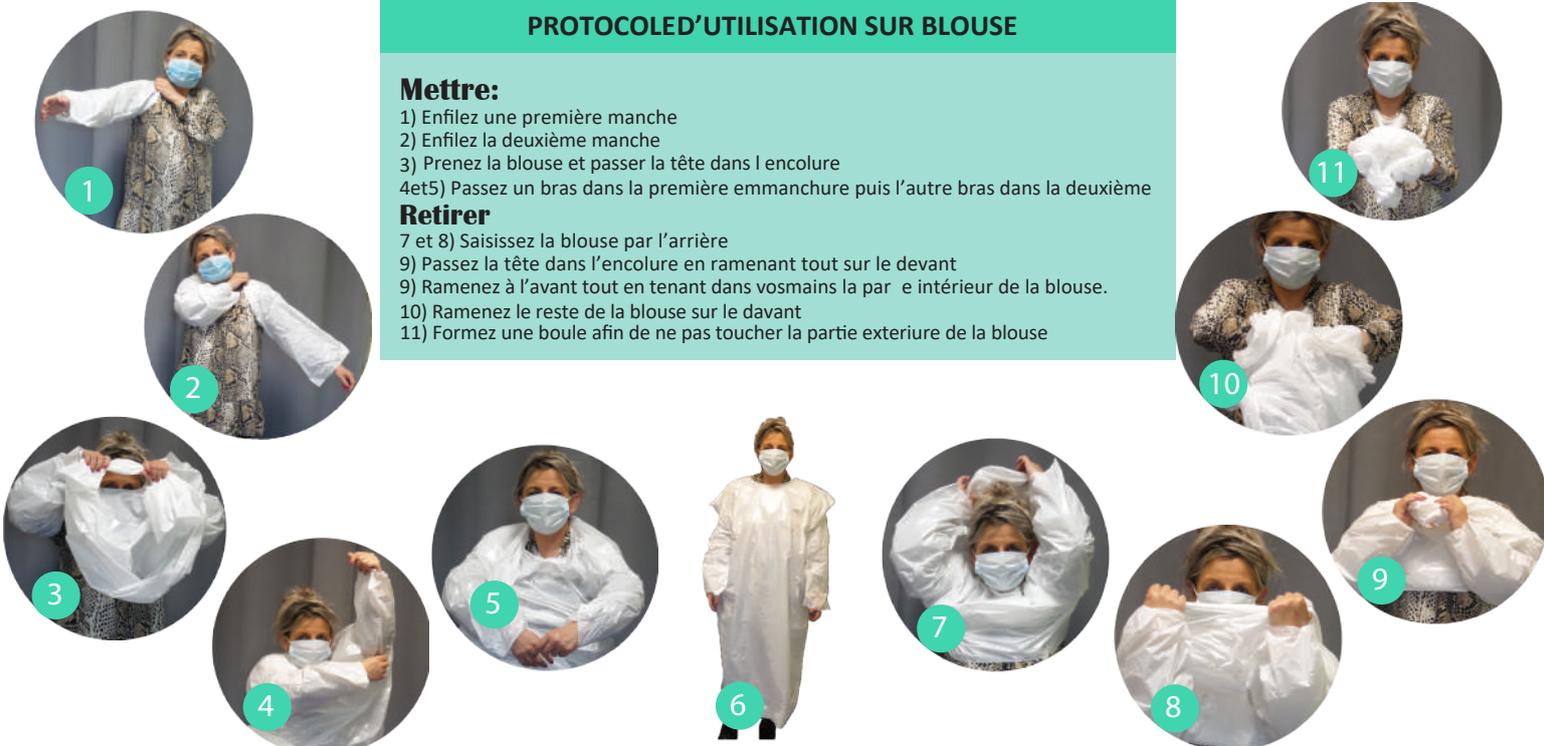

Fabriqué en Haute loire par :